



BAFIX[®]
system

A melhor base para o seu trabalho



BAFIX 1

Modelo Patenteado

 **labordental ltda.**

Desde 1977

Técnica de Trabalho



1 Recorte as bordas do molde e a altura excessiva na região do palato



2 Insira a base BAFIX I no molde, verificando se a posição dos troquês a serem individualizados está correta.



3 Crie marcas de referência entre a moldeira e a base de plástico BAFIX I.



4 Preencha concomitantemente o molde e a base BAFIX I, com o mesmo gesso, de modo a que ambos fiquem nivelados.



5 Posicione a base BAFIX I sobre o molde, guiando-se pelas marcas de referência previamente criadas.



6 Após o endurecimento do gesso, bata levemente ao redor da base BAFIX I para remover o modelo, separando-o do molde.



7 Com o auxílio de um instrumento, separe as travas laterais, liberando o modelo.



8 Bata levemente nas laterais e na parte posterior da base BAFIX I para facilitar a remoção do modelo. Em seguida à remoção dos resíduos de gesso das bordas, proceda ao corte e individualização do modelo, através dos métodos convencionais.

Conheça também outros componentes da família BAFIX:



BX-H+AF



BX-H



BX-F-MS



BX-FM-B