

gingifast



THE BEAUTY KING

Technical

A-Silicone for Gingival Mask

Zhermack[®]
TECHNICAL 

gingifast elastic

A estética natural.

APLICAÇÕES

Polivinilsiloxano para **reprodução gengival** com sistema de **auto-mistura** que fornece, **em curto espaço de tempo**, a correta morfologia para a confecção de próteses fixas.

ESTÉTICA

O **resultado estético** de **GINGIFAST ELASTIC** é garantido por sua **translucidez** e pela presença de vascularizações que lhe conferem um efeito natural.



1 Modelo mestre com máscara produzida com Zetalabor



2 Aplicação de Gingifast Separator sobre a máscara obtida com Zetalabor



3 Detalhe do recorte feito no modelo mestre para a injeção de Gingifast Elastic



4 Posicionamento no modelo da máscara feita com Zetalabor e injeção de Gingifast Elastic



5 Detalhe da máscara gengival após o acabamento



6 Trabalho acabado no modelo mestre

gingifast rigid

Versátil e de fácil acabamento.

APLICAÇÕES

A reprodução gengival utilizada em **implantodontia** simula o condicionamento do tecido gengival para determinar a forma dos contornos cervicais e o perfil de emergência da prótese.

DUREZA

A **dureza equilibrada** facilita o **acabamento** dos rebordos durante o acabamento da gengiva no modelo.



1 Delimitação com cera periférica



2 Aplicação de *Gingifast Separator* sobre o molde



3 Detalhe da ponta intra-oral imersa durante a aplicação



4 Molde aumentado para o vazamento final do modelo



5 Detalhe da gengiva reproduzida



6 Facilidade de acabamento



Embalagem

C401500 GINGIFAST ELASTIC	2 cartuchos de 50 ml + 12 pontas misturadoras amarelas + 1 Separator + 12 pontas intra-orais amarelas + 1 nebulizador
C401520 GINGIFAST RIGID	2 cartuchos de 50 ml + 12 pontas misturadoras amarelas + 1 Separator + 12 pontas intra-orais amarelas + 1 nebulizador

Acessórios

C202100 DISPENSER D2	Dispensador D2 - 1:1
C207203 TRILHO	Trilho para dispensador D2 - 1:1
C202070 MIXING TIPS SMALL	Pontas misturadoras amarelas (48)
C202090 ORAL TIPS	Pontas intra-orais amarelas (48)
C400887 SEPARATOR FOR GINGIFAST	1 frasco de 10 ml

BRANCHES

GERMANY
Zhermack GmbH
Deutschland
Öhlmühle 10 - D-49448 Marl
Tel. +49 - 0 54 43 / 20 33 - 0
Fax +49 - 0 54 43 / 20 33 - 11
info@zhermack.de
www.zhermack.com

POLAND
Zhermapol Sp. z o.o.
ul. Augustówka 14
02 - 981 Warszawa - Polska
Tel. +48 - 22 858 82 72
+48 - 22 858 73 41
Fax +48 - 22 642 07 14
biuro@zhermapol.pl
www.zhermapol.pl

USA
Zhermack Inc.
P.O. Box 4195, River Edge
New Jersey 07661 - 4195
Tel. +1 - (877) 819 6206
+1 - (732) 389 8540
Fax +1 - (732) 389 8543
info@zhermackusa.com
www.zhermackusa.com

COUNTRY CONTACTS

UK AND IRELAND
Tel. +44 - (0)7860 346 129
uk@zhermack.com

SPAIN
Tel. +34 - 900 99 39 52
info.spain@zhermack.com

TURKEY
Tel. +90 533 76 44 955
info.turkey@zhermack.com

FRANCE
Tel. +33 - 0800 915 083
info.france@zhermack.com

RUSSIA
Tel. +7 - 916 930 1191
info.russia@zhermack.com

MEXICO AND CENTRAL AMERICA
Tel. +52 - 1 55 919 804 97
info.mexico@zhermack.com

SOUTH AMERICA
Tel. +57 - 310 2601 777
info.colombia@zhermack.com

Zhermack SpA

Via Bovazecchino, 100 - 45021 Badia Polesine (RO) ITALY
Tel. +39 - 0425 597611 Fax +39 - 0425 53596 info@zhermack.com www.zhermack.com