

GINGIFAST



GUIA DO USUÁRIO

Silicone de adição para reprodução gengival

Gingifast, aesthetics & performing versatility



Os silicones de adição Gingifast são concebidos para reproduzir a morfologia gengival em modelos para aplicações de prótese fixa e sobre implante.

Gingifast Elastic garante excelentes resultados estéticos, graças à sua translucidez e à presença de vascularizações.

Gingifast Rigid é indicado para a técnica direta. Graças à sua rigidez balanceada, pode ser trabalhado facilmente com brocas e é o principal produto no campo de próteses sobre implante.

Gingifast CAD, um silicone fluido escaneável, completa a gama. Escaneável e legível sem a necessidade de sprays refletivos, é concebido para o máximo desempenho na aquisição de dados de 3D.

A Zhermack oferece a **máscara de gengiva** mais apropriada para todos os tipos de aplicação.

Produto	Recomendado na presença de retenções	Recomendado na presença de implantes
Gingifast Elastic	●	○
Gingifast Rigid	○	●
Gingifast CAD Elástico	●	●
Gingifast CAD Rígido	○	●

● altamente recomendado ○ recomendado


1. GINGIFAST RIGID

TÉCNICA SIMULTÂNEA


É aplicado diretamente no molde, e é a técnica ideal para implantologia.

Materiais usados: Hydrorise Implant, Gingifast Rigid, Elite Rock.

Molde do análogo

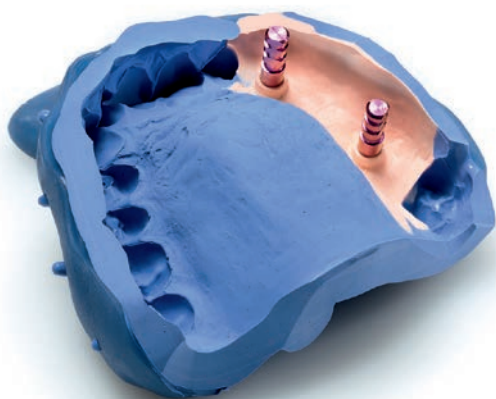

Barreiras de cera

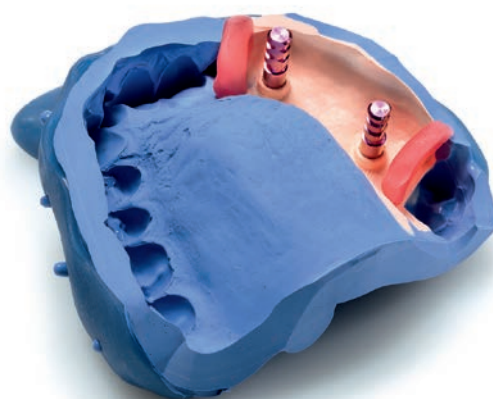

Aplicação do separador



Aplicação de Gingifast Rigid





Criação dos pontos de orientação
e dicagem do molde



Vazamento de gesso



RESULTADO FINAL



2. GINGIFAST ELASTIC

TÉCNICA INDIRETA


É aplicado diretamente no modelo de gesso, e é a técnica recomendada para reprodução gengival no caso de próteses dentossuportadas.

Materiais usados: Gingifast Elastic, Zetalabor, Elite Base, Elite Rock.

Modelo mestre



Máscara com Zetalabor

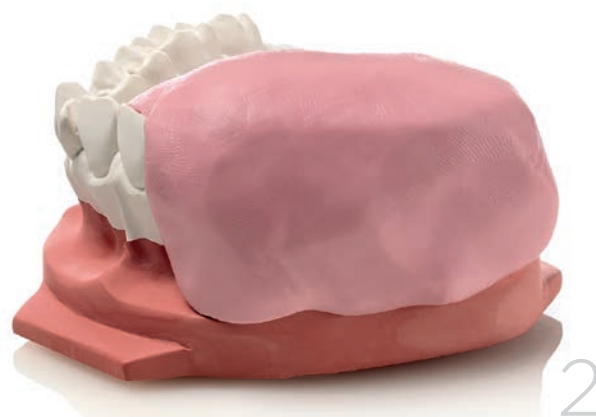

Remoção da máscara



Diestone



4



5



Criação dos orifícios para injeção do silicone e aplicação do separador na máscara

Reposicionamento de máscara no modelo mestre




6

Injeção de Gingifast Elastic na máscara



7

>>
Injeção de Gingifast Elastic concluída
(o material goteja pelos canais de ventilação)

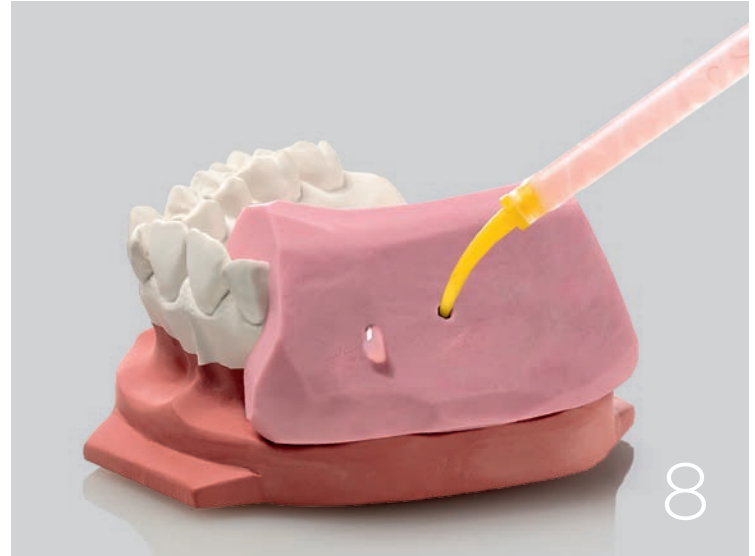

Remoção da máscara
(canais de ventilação presentes na gengiva)
e acabamento subsequente da gengiva,
eliminando os canais de ventilação



RESULTADO FINAL







Características técnicas

Produto	Relação de mistura (Base:catalisador)	Tempo de trabalho* (min:s)	Tempo de presa* (min:s)	Dureza (Shore A)	Escaneável sem sprays	Fresável
Gingifast Elastic	1:1	2:00	10:00	40		
Gingifast Rigid	1:1	2:00	10:00	70		
Gingifast CAD Elástico	1:1	2:00	10:00	40		
Gingifast CAD Rígido	1:1	2:00	10:00	70		

* Os tempos mencionados acima consideram o início da fase de mistura a 23° C (73° F).

Códigos



Gingifast Elastic - Silicone de adição para reprodução gengival

Código	Embalagem
C401500	2 cartuchos x 50 ml + 1 frasco Gingifast Separator 10 ml + 12 ponteiros de mistura amarelas + 12 pontas intraorais amarelas + 1 bico pulverizador com gatilho



Gingifast Rigid - Silicone de adição para reprodução gengival

Código	Embalagem
C401520	2 cartuchos x 50 ml + 1 frasco Gingifast Separator 10 ml + 12 ponteiros de mistura amarelas + 12 pontas intraorais amarelas + 1 bico pulverizador com gatilho



Gingifast CAD Elastic - Silicone de adição escaneável para reprodução gengival

Código	Embalagem
C203227	2 cartuchos x 50 ml + 1 frasco Gingifast Separator 10 ml + 12 ponteiros de mistura azuis



Gingifast CAD Rigid - Silicone de adição escaneável para reprodução gengival

Código	Embalagem
C203232	2 cartuchos x 50 ml + 1 frasco Gingifast Separator 10 ml + 12 ponteiros de mistura azuis

Acessórios

C400888



2 x 10 ml Gingifast Separator



Ponteiras de mistura amarelas (48 unidades)



Pontas intraorais amarelas (48 unidades)

C202100



Dispensador D2 - 1:1



Ponteiras de mistura azuis (48 unidades)

Descubra mais sobre os produtos Zhermack associados para reprodução gengival



Hydrorise Implant

Silicone de adição de alta rigidez,
ideal em implantologia



Elite Rock

Extra rígido
Gesso tipo 4 para
modelos mestres em
aplicações de prótese fixa



Elite Base

Gesso fluido tipo 4
para preparação
de bases



Zetalabor

Silicone de condensação
para máscaras

Para obter mais informações, visite nosso website: www.zhermack.com

Fulfilling your needs