

# CERAMAGE<sup>UP</sup>

Compósito Microhíbrido Fluido Fotopolimerizável





## Convincentemente diferente

Sistemas de cobertura precisam preencher requisitos que mudam constantemente. Os pacientes possuem expectativas muito altas em termos estéticos e desejam resultados tão naturais quanto possível, não apenas no caso das restaurações cerâmicas. É importante que materiais derivados da cerâmica também possam oferecer soluções perfeitas.

Após vários anos de pesquisa e desenvolvimento, foi criado um compósito microhíbrido de ponta e que define novos padrões para o campo dos materiais fotopolimerizáveis restauradores e para cobertura: **CERAMAGE UP**.


Este material de alta performance combina todos os benefícios dos compósitos e das cerâmicas em um único produto.

Graças à viscosidade tixotrópica deste compósito pronto para uso, é possível criar o formato do dente diretamente, usando o dispensador fornecido, ou usar espátula ou pincel, conforme a preferência do usuário.



## Imperceptivelmente Natural

Os incisais e o translúcido **CERAMAGE UP** têm uma opalescência que imita as características ópticas e de luz dos dentes naturais. Isto contribui para a obtenção da aparência idêntica à natural com vivacidade e brilho surpreendentes em todas as condições de iluminação.

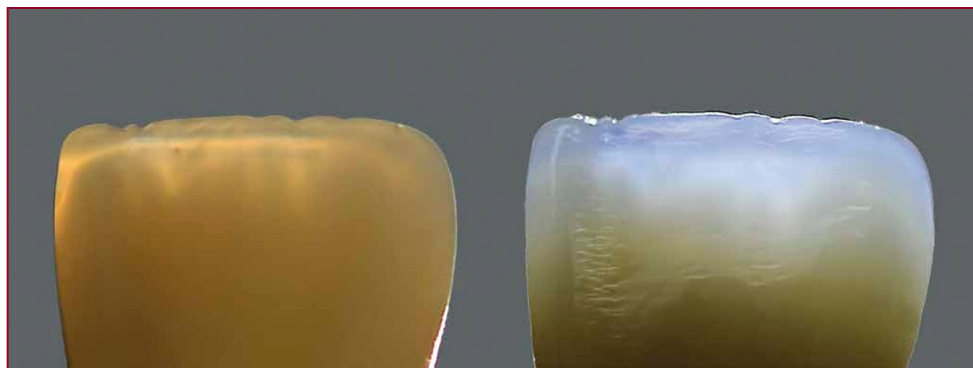



# Sistema completo para todas as indicações

**CERAMAGE UP** combina como só ele economia e custo-benefício em um sistema completo e compacto. Além disso, esse material altamente tecnológico é extremamente durável, elástico e estético.

Diferentemente das cerâmicas, **CERAMAGE UP** absorve a tensão, um benefício digno de nota para casos de cargas oclusais importantes.


A ampla linha de indicações inclui todos os tipos de restaurações posteriores e anteriores confortáveis e duradouras.

- Coroas e pontes totalmente revestidas
- Sobreestruturas de implantes e coroas telescópicas totalmente revestidas
- Trabalhos com *attachments*
- Restaurações oclusais
- Inlays/onlays e facetas
- Provisórios de longa duração
- Caracterização de prótese total

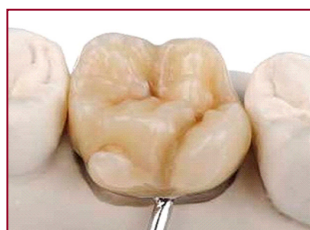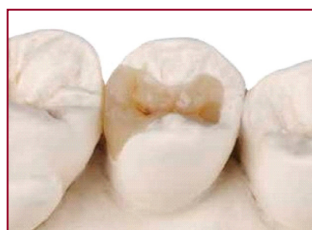


## Único

A alta carga de cerâmica e a nanoestrutura compactada com homogeneidade garantem a **CERAMAGE UP** resistência à abrasão excelente, resistência à flexão e estabilidade da cor. Esta combinação o torna um material de cobertura ímpar.

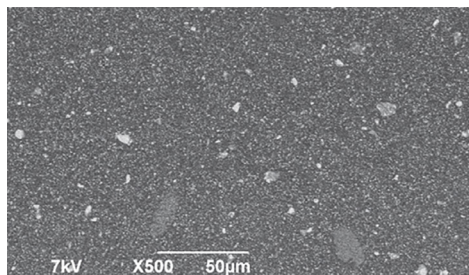

Compositos fluidos convencionais geralmente apresentam conteúdo de carga inferior e distribuição estrutural irregular.

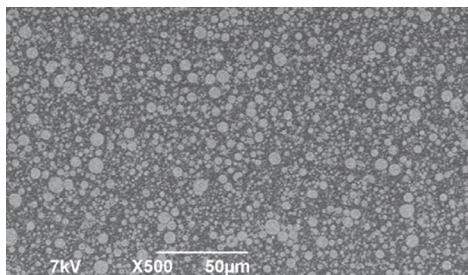

Graças à sua nanoestrutura homogênea e densa, **CERAMAGE UP** é fluido e facilmente esculpível.

## Moderno e eficiente

Cores naturais para aparência estética, alta resistência e elasticidade, características ótimas para receber polimento e durabilidade confiável. **CERAMAGE UP** permite criar restaurações verdadeiramente extraordinárias que atendem perfeitamente todos estes requisitos.



## BENEFÍCIOS

Indicações praticamente ilimitadas

Reprodução simples e eficiente de todas as cores baseadas no sistema de cores VITA® Classical.

Estética natural e opalescência incríveis.

Força e resistência à abrasão impressionantes.

Adesão confiável a todas as ligas dentais e subestruturas em materiais cerâmicos ou híbridos com sistema de adesão CRB e os Primers indicados para os diversos materiais.

Densidade superficial e características de polimento excelentes.

## Personalizável e confiável

Para personalizar a aparência das restaurações posteriores e anteriores, as cores do compósito podem ser facilmente misturadas entre si. Ao usar materiais pastosos, a mistura costuma induzir à inclusão de bolhas de ar e uma consistência não homogênea. Sendo um compósito fluido, **CERAMAGE UP** oferece o máximo em termos de confiabilidade e versatilidade.

As cores podem ser misturadas como porcelanas para obter alguma outra cor intermediária desejada, a depender de suas exigências estéticas individuais.



# Garantia da máxima versatilidade estética

**CERAMAGE UP** é um sistema compósito modular para uso indireto, e as cores de todos os seus componentes combinam perfeitamente entre si.

## Cores básicas

Cor	A1	A2	A3	A3,5	A4	rootA	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
<b>OPACO UNIVERSAL</b>	A1O	A2O	A3O	A3,5O	A4O	rootAO	B1O	B2O	B3O	B4O	C1O	C2O	C3O	C4O	D2O	D3O	D4O
<b>CERVICAL</b>	—	AC1	—	AC2	—	—	—	BC1	BC2	—	CC1	CC2	—	DC1	DC2	—	—
<b>DENTINA OPACA</b>	ODA1	ODA2	ODA3	ODA3,5	ODA4	ODrootA	ODB1	ODB2	ODB3	ODB4	ODC1	ODC2	ODC3	ODC4	ODD2	ODD3	ODD4
<b>CORPO</b>	A1B	A2B	A3B	A3,5B	A4B	rootAB	B1B	B2B	B3B	B4B	C1B	C2B	C3B	C4B	D2B	D3B	D4B
<b>INCISAL</b>	58	59	60	60	60	60	57	58	59	60	58	59	60	59	60	59	60

As cores básicas correspondem ao sistema de cores VITA® Classical.

## Cores para Dentes Clareados

Mais e mais pacientes optam pelo clareamento de seus dentes. As cores **CERAMAGE UP** para dentes clareados contribuem para o ajuste perfeito das restaurações às cores dos dentes clareados.

As cores para dentes clareados W0 a W3 correspondem às cores *bleach* BL1 a BL4.

Cor	W0	W1	W2	W3
<b>OPACO UNIVERSAL</b>	W0O	W1O	W2O	W3O
<b>CORPO</b>	W0B	W1B	W2B	W3B
<b>INCISAL</b>	56	57	57	57



## Cores de Efeito e Gengiva

Além das cores incisais básicas, o sistema **CERAMAGE UP** também inclui uma série de cores de efeito translúcidas e intensivas. Esse amplo espectro oferece a liberdade de encarar qualquer desafio estético.

Para a “estética vermelha” há 11 cores de gengiva a escolher.

<b>OPACO UNIVERSAL</b>	MO	BGO	GO	WO	GUM-O	PreO	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>TRANSLÚCIDO</b>	T	HVT	LVT	T-Glass	BG	GT	CT-A	CT-B	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>INCISAL</b>	56	57	58	59	60	61	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>CONCENTRADO</b>	MY	WE	OC	AM-Y	W	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>COR DE GENGIVA</b>	GUM-L	GUM-D	GUM-O	GUM-B	GUM-V	GUM-R	GUM-LP	GUM-OP	GUM-SP	GUM-P	GUM-T	—	—	—	—	—	—

# Componentes do sistema

**CERAMAGE UP** está disponível em seringas com 5g, em 17 cores de dentina opaca, 21 cores de corpo, 8 cores para cervical, 5 cores para incisal, 11 cores de gengiva, 5 cores de efeito, 8 cores translúcidas, além de estojos com cores variadas.

## CERAMAGE UP Estojo 2 Cores

A introdução econômica à técnica **Ceramage UP** para restaurações nas Cores A2 e A3

PN 2306



- 2x Opaco Universal , 2 ml cada
- 1x Cervical, 5 g
- 2x Corpo, 5 g cada
- 2x Incisal, 5 g cada
- 1x Translucido, 5 g
- Universal Oxy-Barrier, 10 g
- Dura-Polish, 20 g
- Dura-Polish DIA, 5 g
- Uni Brush No 5
- 10 Casulos descartáveis para mistura Dispo dishes
- Bloco para espatulação
- Tampa protetora de luz
- 10 pontas e tampas
- 2 dispensadores para seringa
- Tabela de Cores
- Instruções de Uso

## CRB - Ceraresin Bond

Para todos os reparos de porcelana e compósito.

PN 1741



## ML PRIMER

Agente de união para adesão entre resinas compostas e todas as ligas preciosas ou não. 5ml.

PN 1740



\* VITA é uma marca registrada da VITA Zahnfabrik, Bad Säckingen, Alemanha.

# Informações para pedido de itens avulsos

Listagem de todos os itens avulsos com seus respectivos códigos

Cor	PN 5 g
<b>CORPO</b>	
W0B	2331
W1B	2332
W2B	2333
W3B	2334
A1B	2335
A2B	2336
A3B	2337
A3.5B	2338
A4B	2339
rootAB	2340
B1B	2341
B2B	2342
B3B	2343
B4B	2344
C1B	2345
C2B	2346
C3B	2347
C4B	2348
D2B	2349
D3B	2350
D4B	2351

Cor	PN 5 g
<b>DENTINA OPACA</b>	
ODA1	2311
ODA2	2312
ODA3	2313
ODA3.5	2314
ODA4	2315
ODrootA	2316
ODB1	2317
ODB2	2318
ODB3	2319
ODB4	2320
ODC1	2321
ODC2	2322
ODC3	2323
ODC4	2324
ODD2	2325
ODD3	2326
ODD4	2327

Cor	PN 5 g
<b>CERVICAL</b>	
AC1	2381
AC2	2382
BC1	2383
BC2	2384
CC1	2385
CC2	2386
DC1	2387
DC2	2388
<b>INCISAL</b>	
56	2355
57	2356
58	2357
59	2358
60	2359
<b>TRANSLÚCIDO</b>	
T	2361
HVT	2362
LVT	2363
T-Glass	2364
BG	2365
GT	2366
CT-A	2367
CT-B	2368

Cor	PN 5 g
<b>EFEITO</b>	
MY	2371
WE	2372
OC	2373
AM-Y	2374
W	2375
<b>GENGIVA</b>	
GUM-L	2391
GUM-D	2392
GUM-Or	2393
GUM-Br	2394
GUM-V	2395
GUM-R	2396
GUM-DP	2397
GUM-LP	2398
GUM-P	2399
GUM-SP	2400
GUM-T	2369





**SHOFU INC.**

11 Kamitakamatsu-cho, Fukuine, Higashiyama-ku, Kyoto 605-0983, Japan

**SHOFU DENTAL BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA.**

AV FAGUNDES FILHO,134,CONJ 61,VILA MONTE ALEGRE,SAO PAULO,SP,04304-000,Brasil

[www.shofu.com](http://www.shofu.com)

Distribuidor no Brasil:



10/2020