



**Dura-Green®**  
**Dura-Green Fine®**  
Instruções de uso

Fabricadas a partir de grãos finos de carboneto de silício.

As **Pedras Dura-Green®** são excepcionais para ajuste rápido e acabamento de porcelana, compósitos, ouro, prata, amálgama e metais não preciosos e as **Pedras Dura-Green Fine®** para ajuste rápido e acabamento de porcelana, compósitos e compômeros.

### **TÉCNICA**

Usar as **Pedras Dura-Green®** e **Dura-Green Fine®** em baixa velocidade (5.000 a 20.000 rpm) e as Rodas Dura-Green entre 5.000 e 15.000 rpm. A pressão recomendada é de 3-5N.

### **OBSERVAÇÕES**

- Utilizar os abrasivos apenas até a velocidade máxima e pressão recomendadas. Inserir a haste do instrumento completamente na pinça de aperto da peça-de-mão.
- Rodar sempre os instrumentos antes de utilizar, para verificar o seu funcionamento correto e seguro
- Não utilizar em ângulo acentuado
- Utilizar óculos de proteção
- Utilizar estes produtos apenas para o fim indicado
- Armazenar em local fresco e seco, ao abrigo da luz

### **ESTERILIZAÇÃO**

Em autoclave a vapor.

Não utilizar limpador ultrassônico.

Sem refrigeração

**Notificação ANVISA: 10258190118**

Fabricante: **SHOFU INC.**  
11 Kamitakamatsu-Cho, Fukuine-  
Higashiyama-KU, Kioto 605 - Japão

Detentor da notificação:  
**LABORDENTAL LTDA**  
Av. Aratãs, 164 - São Paulo, SP  
S.A.C.: (11) 5542.5855  
Responsável Técnico  
Regiane Azevedo M.Pires - CRO-SP: 61894  
CNPJ: 48.767.834/0001-53  
labordental@labordental.com.br  
www.labordental.com.br