

**DESCRIÇÃO DO PRODUTO**

Dura-Green DIA é um abrasivo diamantado com aglutinante vitrificado. O SHOFU ADJUSTER está disponível como acessório para ser usado com o Dura-Green DIA.

**FINALIDADE DE USO**

Contorno e acabamento de restaurações indiretas

- Porcelana
- Zircônia
- Dissilicato de lítio, etc.

**PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS**

- Nunca exceder a velocidade máxima de rotação admissível.

30.000 rpm
------------

- Inserir a haste completamente no mandril da peça de mão de acordo com as instruções do fabricante.
- Antes de cada utilização, executar um teste para verificar a segurança e o bom funcionamento sem excentricidade.
- Verificar se a cabeça abrasiva se encontra em boas condições antes da utilização. Não utilizar instrumentos danificados ou com defeitos como corrosão, falha da superfície, deformação, sujos e com a haste exposta devido ao uso repetido.
- Usar um dispositivo de aspiração local do pó, máscara de proteção contra o pó, etc. durante o contorno e o acabamento, para evitar os efeitos nocivos do pó para o corpo humano.
- Usar equipamento de proteção, como óculos, durante a utilização do produto.
- Evitar qualquer utilização em ângulos agudos ou com pressão excessiva em abrasivos finos e longos. Eles são frágeis e podem se dobrar ou quebrar se a carga for excessiva.
- Usar o SHOFU ADJUSTER para remover o acúmulo de resíduos ou para ajustar o abrasivo ao tamanho desejado.
- Este produto destina-se somente ao uso por profissionais da área odontológica.
- Não usar este produto para quaisquer outros fins não especificamente descritos nestas instruções de uso.

**ARMAZENAMENTO E ESTERILIZAÇÃO**

Armazenar este produto evitando a exposição à umidade, produtos químicos corrosivos e seus vapores. Manter afastado de pressão externa (carga física) e evitar contaminação.

Esterilizar este produto antes de cada utilização intraoral. Para a reutilização após o uso, remover imediatamente todos os contaminantes com um agente de lavagem e desinfecção e, em seguida, esterilizar.

(Autoclave)

Tipo de ciclo	Temperatura	Tempo de espera	Tempo de secagem
Pré-vácuo 3 vezes	134°C	3'00"	10'00"

Seguir as instruções de uso do fabricante do agente de lavagem e desinfecção e do esterilizante, respectivamente. Não deve ser usado desinfetante de cloro para evitar a corrosão dos instrumentos. Para mais informações sobre os procedimentos de REPROCESSAMENTO, visitar [www.shofu.de](http://www.shofu.de).

**DESCARTE**

Descartar de acordo com os regulamentos locais e nacionais relevantes.