



Dura-White Instruções de uso

Para acabamento final de esmalte, compósitos, compômeros, ionômero de vidro e cerâmica. Fabricadas em óxido de alumínio microgranulado. Perfeitamente balanceadas para cortar sem vibração.

TÉCNICA

As Pedras Dura-White devem ser usadas em baixa velocidade, entre 5.000 e 20.000 rpm. A pressão recomendada é de 2N.

OBSERVAÇÕES

- Utilizar os abrasivos apenas até a velocidade máxima e pressão recomendadas. Inserir a haste do instrumento completamente na pinça de aperto da peça-de-mão.
- Rodar sempre os instrumentos antes de utilizar, para verificar o seu funcionamento correto e seguro
- Não utilizar em ângulo acentuado
- Utilizar óculos de proteção
- Utilizar estes produtos apenas para o fim indicado
- Armazenar em local fresco e seco, ao abrigo da luz

ESTERILIZAÇÃO

Em autoclave a vapor.

Não utilizar limpador ultrassônico.

Sem refrigeração

Notificação ANVISA: 10258190118

Fabricante: SHOFU INC.

11 Kamitakamatsu-Cho, Fukuine-
Higashiyama-KU, Kioto 605 - Japão

Detentor da notificação:

LABORDENTAL LTDA

Av. Aratãs, 164 - São Paulo, SP

S.A.C.: (11) 5542.5855

Responsável Técnico

Regiane Azevedo M.Pires - CRO-SP: 61894

CNPJ: 48.767.834/0001-53

labordental@labordental.com.br

www.labordental.com.br