




Super-Snap / Super-Snap Polystrips

Instruções de uso


Para dar contorno, acabamento e polimento a todos os compósitos híbridos e microhíbridos. Todos os Discos Super-Snap são fabricados sem centro metálico e sem exposição do mandril. O centro é à base de silicone.

Para acabamento e polimento interproximal, utilizar as **Polystrips Super-Snap**. São tiras de acabamento superfinais codificadas em quatro cores, para acabamento e polimento interproximal: **preto-grosso** para desgaste, **violeta médio** para acabamento, **verde-fino** para polimento e **vermelho-superfino** para superpolimento.


DISCOS SUPER-SNAP

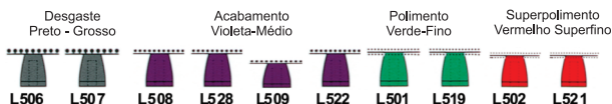

MANDRIL SUPER-SNAP

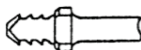

AR-PN0439

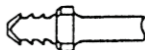

AR-PN0440(plástico)

POLYSTRIP SUPER-SNAP



TÉCNICA

Os Discos Super-Snap devem ser usados em baixa velocidade: 10.000-12.000 rpm com pressão de 0,3-0,6N.

OBSERVAÇÕES:

- Utilizar os discos apenas até a velocidade máxima e pressão recomendadas.
- Rodar sempre os instrumentos antes de utilizar, para verificar o seu funcionamento correto e seguro
- Utilizar óculos de proteção
- Utilizar estes produtos apenas para o fim indicado
- Descartar após o uso

Notificação ANVISA: 10258190118

Fabricante: SHOFU INC.

11 Kamitakamatsu-Cho, Fukuine- Higashiyama-KU, Kioto 605 - Japão

Detentor da notificação: LABORDENTAL LTDA

Av. Aratás, 164 - São Paulo, SP / S.A.C.: (11) 5542.5855

Responsável Técnico - Regiane Azevedo M.Pires - CRO-SP: 61894

CNPJ: 48.767.834/0001-53

labordental@labordental.com.br

www.labordental.com.br