

LER CUIDADOSAMENTE ANTES DE USAR

Opaco Universal SHOFU

Pasta opaca fotopolimerizável

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Opaco Universal SHOFU é composto por dois itens, PRÉ-OPACO e OPACO, e foi concebido para ser usado em conjunto com SOLIDEX, CERAMAGE e outras resinas compostas para uso indireto.

INDICAÇÕES DE USO

- Mascaramento da cor do metal da coroa
- Mascaramento da cor da subestrutura da coroa, faceta laminada ou outra
- Mascaramento da cor da subestrutura de restaurações e próteses fixas em porcelana ou resina composta, em reparos intra ou extraorais

PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS

1. Não utilize este produto em pacientes com alergias conhecidas a este produto e / ou monômero de metacrilato.
2. Os operadores com alergias conhecidas a este produto e / ou monômero de metacrilato não devem utilizar este produto.
3. Se qualquer inflamação ou outras reações alérgicas ocorrerem no paciente ou no operador, interromper imediatamente o uso e procurar orientação médica.
4. Usar luvas e óculos de proteção plásticos para uso médico (odontológico) para evitar a sensibilização a este produto. Em caso de contato acidental com os tecidos moles orais ou pele, limpar imediatamente com uma bolinha de algodão umedecida com álcool e enxaguar com água em abundância. Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente os olhos com água em abundância e consultar um médico.
5. Houve alguns relatos de operadores que desenvolveram reação de sensibilização por manipulação manual de material não curado incorporando os mesmos componentes químicos incluídos neste produto.
6. Seguir as instruções de uso de cada material, instrumento ou equipamento dentário a ser utilizado em conjunto com este produto.
7. Não utilizar este produto para fins diferentes dos especificamente descritos nestas instruções de uso.
8. Utilizar este produto dentro do prazo de validade indicado na embalagem.
(Exemplo AAAA-MM-DD → Ano-Mês-Dia da data de validade)
9. Este produto destina-se a uso apenas por profissionais da área odontológica.

INSTRUÇÕES DE USO

O Opaco Universal SHOFU pode ser usado para uma variedade de casos para mascarar a subestrutura. Deste modo, a fabricação de coroas, pontes e facetas com materiais à base de resina é uma indicação típica deste produto.

1. Preparação de estruturas
Produzir uma armação metálica da maneira convencional. Jatear a superfície de metal com óxido de alumínio. Em seguida, aplicar um primer para metal na superfície (p.ex., Primer M.L., SHOFU MZ Primer Plus, etc.).
2. Aplicação do PRÉ-OPACO
 - 2-1. Dispensar uma quantidade adequada de PRÉ-OPACO em um bloco de manipulação, recipiente ou diretamente sobre um pincel.
 - 2-2. Aplicar o material dispensado à superfície do metal pré-tratado.
 - 2-3. Fotopolimerizar o PRÉ-OPACO aplicado utilizando um equipamento de fotopolimerização de laboratório adequado, durante o tempo indicado.

3. Aplicação do OPACO

3-1. Dispensar uma quantidade adequada de OPACO em um bloco de papel, recipiente ou diretamente sobre um pincel.

3-2. Aplicar o material sobre a superfície que recebeu o PRÉ-OPACO.

3-3. Fotopolimerizar o OPACO utilizando uma unidade de fotopolimerização de laboratório adequada, durante o tempo indicado.

Tempo de fotopolimerização padrão com um equipamento de fotopolimerização indicado para laboratório

| Unidade fotopolimerizadora | Solidilite V (Lâmpada halógena) |
|----------------------------|---------------------------------|
| PRÉ-OPACO | 1 min. |
| OPACO | 3 min. |

Ao utilizar um equipamento de fotopolimerização para laboratório diferente do Solidilite V, assegurar-se de que haja uma intensidade de luz ideal para polimerizar estes materiais adequadamente, de acordo com as instruções de uso específico de cada unidade de fotopolimerização.

Repetir o processo de aplicação e fotopolimerização, se necessário.

Se estiver aplicando sobre uma área grande ou em múltiplos dentes, dividir a área em algumas partes para fotopolimerizar e mudar a direção da irradiação da luz para alcançar toda a área.

Se estiver aplicando em várias camadas, fotopolimerizar cada camada de forma apropriada.

4. Depois de confirmar que o OPACO está completamente fotopolimerizado, construir a peça em resina composta sobre o OPACO curado, completar a forma da coroa e fotopolimerizar o compósito. Contorno, acabamento e polimento da restauração são feitos da maneira convencional.

NOTA SOBRE O USO

1. Fechar bem a tampa imediatamente após cada utilização.

2. Usar um pincel apropriado para a aplicação. Limpar o pincel usado com álcool, etc.

3. Proteger da luz ambiente o material dispensado, usando proteção contra luz.

4. Evitar manusear o Opaco Universal SHOFU em área exposta a luz intensa, como por exemplo próximo a uma janela ou imediatamente sob a luz da bancada de trabalho, para evitar a polimerização involuntária da pasta.

5. Utilizar pincéis separados para PRÉ-OPACO e OPACO.

COMPOSIÇÃO

PRÉ-OPACO: UDMA, Pó de Sílica, Pigmentos, Iniciador de polimerização e outros

OPACO: UDMA, Pó de Sílica, Pigmentos, Iniciador de polimerização e outros

ARMAZENAMENTO

Armazenar em local escuro à temperatura ambiente (1-25 °C / 34-77 °F). Evitar altas temperaturas e umidade.

Manter afastado da luz do sol e de qualquer fonte de ignição.

CUIDADO: A lei federal dos Estados Unidos restringe a venda deste dispositivo para ou por ordem de um profissional de odontologia.

CORES

| | |
|-------------------|---|
| PRÉ-OPACO (1 cor) | PRÉ-OPACO |
| OPACO (31 cores) | A1O, A2O, A3O, A3.5O, A4O, B1O, B2O, B3O, B4O, C1O, C2O, C3O, C4O, D2O, D3O, D4O, rootAO, R2O, R3O, R3.5O, WO, W2O, W3O, GUM-O,BGO, GO, MO, InO, VpO, VrO, PO |

Fabricado por:
SHOFU, INC.
11 Kamitakamatsu-cho, Fukuine, Higashiyama-ku,
Kyoto 605-0983, Japão

Importado e distribuído por:
LABORDENTAL LTDA.
Av. Aratãs 164
São Paulo, SP 04081-000
C.A.C. (11) 5542-5855
labordental.com.br
CNPJ 48.767.834/0001-53

Resp. Técnico
REGIANE A. MONTE PIRES
C.R.O. SP 61894