

VESTIGE CLEAR THX

SILICONE POR ADIÇÃO TRASPARENTE PARA MOLDAGEM E INJEÇÃO DE COMPOSTOS FÓTOPOLIMERIZÁVEIS EM LABORATÓRIO

DESCRIÇÃO/ USO

Vestige Clear THX: Polivinilsiloxano transparente de consistência média para uso em laboratório. Indicado como contramolde nas técnicas de moldagem de resinas compostas com mufla transparente. Particularmente adaptado para trabalhos de grandes dimensões. Tixotrópico.

ADVERTÊNCIA

Evitar o contato com luvas de látex.

PRECAUÇÕES

Não ingerir, evitar o contato com os olhos.

MODO DE USAR

Inserir o cartucho de Vestige Clear no dispensador manual para cartucho 1:1 de 50 ml. A marcação "V" na base do cartucho deve estar virada para baixo. Travar baixando o êmbolo do dispositivo dispensador. Retirar a tampa colorida girando $\frac{1}{4}$ de volta no sentido anti-horário. Ao pressionar a alavanca do dispensador, e antes de colocar a ponta de mistura, dispensar uma pequena quantidade de material até que os componentes saiam de modo uniforme. Eliminar o material extraído e montar a ponta de mistura realizando a operação inversa à remoção da tampa.

CONSERVAÇÃO

Conservar em local seco, a temperatura entre 5-27°C (41-80°F). Proteger de fontes de calor. Os materiais estão garantidos até a data de vencimento indicada na embalagem.

DADOS TECNICOS	VESTIGE CLEAR THX
Proporção de mistura	1:1
Tempo de mistura (23°C/73°F)	Automistura
Tempo total de trabalho (23°C/73°F)	1'
Tempo de presa (23°C/73°F)	12'
Dureza Shore A	74 ± 2
Variação dimensional linear	< 0,20%
Recuperação elástica	>99,8%

Temperatura mais altas tornarão o processo mais rápido, temperaturas mais baixas o tornarão mais lento.

Limitação da responsabilidade: As indicações relativas aos produtos TRAYART, tanto em forma oral como escrita, são baseadas no conhecimento e na experiência adquiridos no campo da odontologia. Os usuários profissionais devem seguir as instruções de uso e avaliar a adequação do produto em função do tipo de aplicação. O usuário profissional assume toda a responsabilidade por riscos derivados de uma utilização não conforme dos produtos TRAYART. Eventuais defeitos do produto limitam a responsabilidade do fabricante ao valor do produto objeto da reclamação.

SOMENTE PARA USO DENTAL

Fabricante:

Trayart

Via Paiette 13/Q
35040 Castelbaldo (PD)
Itália

Distribuidor:

Labordental Ltda.

Av. Aratãs 164
São Paulo, SP 04081-000
Fone: (11) 5542-5855
CNPJ: 48.767.834/0001-53