

Silicone por adição para a duplicação de modelos no laboratório de prótese dental

Descrição

Polivinilsiloxano líquido para duplicação em laboratório. Extremamente preciso na reprodução da superfície do modelo e dotado de elevada recuperação elástica e resistência ao rasgamento. Após a polimerização mantém a estabilidade dimensional ao longo do tempo.

Indicação

Duplicação do modelo mestre.

Avisos

A superfície do modelo a ser duplicado deve estar totalmente limpa de qualquer resíduo para evitar contaminação. Por precaução, recomenda-se desengordurar com solvente (álcool ou acetona). O modelo deve estar seco antes de proceder ao vazamento do silicone. Posicionar o modelo na base inferior da mufla para duplicação. Inserir a parte superior, e verificar se as dimensões do frasco são compatíveis.

Não inverter as tampas dos frascos.

A proporção de mistura é de 1:1; respeite as proporções.

Instrução de uso

Mistura manual: dosar o mesmo volume ou peso idêntico dos dois componentes em um recipiente cilíndrico limpo. Misture cuidadosamente por cerca de 1 minuto com uma espátula até obter uma cor homogênea.

Verter lentamente **Vestige duple 15** a uma altura de cerca de 20 cm para eliminar as bolhas de ar formadas durante a mistura. O tempo máximo de vazamento é de 5 minutos em temperatura ambiente (23°C/73°F).

Em 30 minutos após o início da mistura, **Vestige duple 15** estará pronto. Abra o frasco e remova cuidadosamente o modelo.

Mistura automática: no caso de misturadores automáticos, seguir as instruções do fabricante do misturador.

Conservação

Armazenar **Vestige duple 15** em local seco com temperatura entre 5-27°C (41-80°F).

Vestige duple 15 é garantido por 24 meses em embalagem lacrada. Consultar o número do lote e a data de validade na embalagem.

Dados técnicos	Vestige duple 15
Proporção de mistura	1:1
Tempo de mistura	1'
Tempo total de trabalho (23°C)	5'
Tempo de presa (23°C)	30'
Dureza	15 Shore "A"
Alteração dimensional linear	< 0,05%



Embalagem padrão:

REF 1L6000 Vestige duple 15 2x1 Kg. Frasco (A+B)

Limitação da responsabilidade: As indicações relacionadas aos produtos TRAYART, tanto na forma oral quanto escrita, estão fundamentadas em conhecimentos e experiência adquiridos na área odontológica. Os usuários profissionais devem, no entanto, seguir as indicações de uso e verificar a adequação do produto ao tipo de aplicação desejada. O usuário profissional assume todas as responsabilidades pelos riscos consequentes de um uso não correto dos produtos TRAYART. Um possível defeito dos produtos limita a responsabilidade do fabricante ao valor do produto TRAYART utilizado pelo profissional.

SOMENTE PARA USO DENTAL

Fabricante:

Trayart
Via Paiette 13/Q
35040 Castelbaldo (PD)
Itália

Importador e distribuidor:

Labordental Ltda.
Av. Aratãs 164
São Paulo, SP 04081-000
Fone: (11) 5542-5855
CNPJ: 48.767.834/0001-53