

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

ZiLMaster é um sistema de polimento diamantado de três etapas, concebido para atingir um alto brilho da superfície em restaurações de zircônia e dissilicato de lítio. Este sistema de três etapas alisa a restauração e remove arranhões na superfície durante o contorno, fornecendo um polimento de alto brilho. ZiLMaster está disponível em uma variedade de formatos em PM (peça de mão - HP) e AR (contra-ângulo - CA), tanto para aplicação extraoral quanto intraoral.

FINALIDADE DE USO

Grosso: Acabamento e pré-polimento de restaurações de zircônia ou dissilicato de lítio

Médio: Polimento de restaurações de zircônia ou dissilicato de lítio

Fino: Polimento final de restaurações de zircônia ou dissilicato de lítio

PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS

> Nunca exceder a velocidade máxima de rotação admissível.

Bala, Faca, Taça, Mini-ponta, KN7, WH6	20.000 rpm
Roda não montada	15.000 rpm

> Inserir a haste completamente no mandril da peça de mão de acordo com as instruções do fabricante.

> Antes de cada utilização, executar um teste para verificar a segurança e o bom funcionamento sem excentricidade.

> Verificar se a ponta ativa se encontra em boas condições antes da utilização. Não utilizar instrumentos danificados ou com defeitos como corrosão, falha da superfície, deformação, sujus e com a haste exposta devido ao uso repetido.

> Usar um dispositivo de aspiração local de pó, máscara de proteção contra pó, etc. durante o contorno e o acabamento, para evitar os efeitos nocivos do pó para o corpo humano.

> Usar equipamento de proteção, como óculos, durante a utilização do produto.

> Evitar qualquer utilização em ângulos agudos ou com pressão excessiva nos abrasivos finos e longos. Eles são frágeis e podem se dobrar ou quebrar se a carga for excessiva.

> Este produto destina-se somente ao uso por profissionais da área odontológica.

> Não usar este produto para quaisquer outros fins que não estejam especificamente descritos nestas instruções de uso.

ARMAZENAMENTO E ESTERILIZAÇÃO

Armazenar este produto evitando a exposição à umidade, produtos químicos corrosivos e seus vapores. Manter afastado de pressão externa (carga física) e evitar contaminação.

Esterilizar este produto antes de cada utilização intraoral.

Para a reutilização após o uso, remover imediatamente todos os contaminantes com um agente de lavagem e desinfecção e, em seguida, esterilizar.

(Autoclave)

Tipo de ciclo	Temperatura	Tempo de espera	Tempo de secagem
Pré-vácuo 3 vezes	134 °C	3'00"	10'00"

Seguir as instruções de uso do fabricante do agente de lavagem e desinfecção e do esterilizante, respectivamente.

Não deve ser usado desinfetante com cloro para evitar a corrosão dos instrumentos.

Para mais informações sobre os procedimentos de REPROCESSAMENTO, visitar www.shofu.de.

DESCARTE

Descartar de acordo com os regulamentos locais e nacionais relevantes.