

BROCA DENTAL CARBIDE – Instruções de Uso

Insira a broca firmemente na pinça da peça-de-mão, sem forçar. Brocas mal fixadas poderão soltar-se ou quebrar-se, causando ferimentos. Faça girar a broca antes de colocá-la em contato com a superfície dentária. Utilize pressão suave e movimentos como de pincel.

PRODUTO NÃO ESTÉRIL. Esterilize antes do primeiro uso e nas utilizações subsequentes.

LIMPEZA: limpe imediatamente após cada uso para evitar a secagem de detritos e contaminantes.

Não utilize dispositivos de limpeza automatizados. **LIMPEZA EM ULTRASSOM:** 5 min.(utilize broqueiro), com detergente enzimático de pH neutro. Siga as instruções do fabricante do detergente para preparar o banho. Seque as brocas com toalha absorvente ou de papel. Inspecione e elimine qualquer broca com sinais de danos ou corrosão. Se alguma broca ainda apresentar resíduos, descarte.

ESTERILIZAÇÃO: antes de esterilizar mergulhe as brocas em solução inibidora de corrosão. Acomode-as em uma bolsa de esterilização e sele. Utilize esterilizador a vapor pressurizado. Para o método de esterilização com pré-vácuo, opere num ciclo de 4 min. Para o método com deslocamento gravitacional, num ciclo de 15 min. Em ambas as situações, a temperatura mínima deve ser de 132 °C. Utilize água destilada.

Passo ao ciclo de secagem completo antes de retirar as brocas do esterilizador: no mínimo 20 min. para esterilização a vapor e 15 min. para a esterilização por gravidade. Armazene as brocas esterilizadas na bolsa de esterilização, num ambiente seco, antes da utilização seguinte. Antes de reutilizar, verifique se há sinais de ferrugem ou corrosão. Não utilize brocas que apresentem corrosão ou estejam danificadas.

Utilize todos os dispositivos de esterilização de acordo com as recomendações do fabricante.

Armazene as brocas esterilizadas na bolsa de esterilização, em ambiente seco.

A eficácia da desinfecção é responsabilidade do usuário.

Fabricante: KERR CORPORATION - 1889 W.Mission Blvd – Pomona , CA 91766 EUA.

Detentor da Notificação: Labordental Ltda. Av. Aratãs 164 - S. Paulo, SP 04081-000.

CNPJ: 48.767.834/0001-53.

Resp Técnico: Regiane A.M.Pires - CROSP 61894

No. de lote e data de fabricação: vide verso. Validade indeterminada.

Notificação ANVISA 10258190094

S.A.C. (11) 5542-5855 labordental@labordental.com.br

